

Handleiding aanbrengen van de ELDA SG oormerken



Het plaatsen van de merkdelen in de tang

Plaats het vrouwelijk deel van het oormerk (rondje of flapje) met het beschermkapje omlaag, in de uitsparing van de tang. Let op dat het oormerkdeel ver genoeg in de tang zit.



De **grijze** Combi Mini tang kan ook worden gebruikt, maar bij het indoen van het elektronisch nummer, **moet** het zwarte kapje verwijderd worden. Voor het gewone oormerk mag dit met of zonder zwart clipje. Bij gebruik van de **rode** Total taggetang het zwarte clipje **altijd** erop laten zitten.

Plaats het mannelijk deel van het oormerk (flapje) over de metalen stift. Zorg ook hier dat het oormerkdeel tot bovenaan is doorgedrukt.

Controleer door licht samendrukken van de tang of pen en gat recht tegenover elkaar zitten.

Plaats in het oor.

Het aanbrengen van het oormerk gebeurt tussen de tweede en derde nerf van de oorschelp van bovenaf geteld, op $1/3^e$ afstand tot $1/2$ van de kop (zie zwarte stippen in de tekening). Deze nerven zijn soms beter te voelen dan te zien. De elektronische nummers bij voorkeur op de $1/2$ van het oor. Zorg dat de buitenkant van het merk niet de rand van de oorschelp kan irriteren of de aders klem zet.



Voordeel van deze plaatsen in het oor zijn dat de oormerken veel minder snel uitscheuren en het oor minder zal bloeden.

Hoger en verder van de kop plaatsen wordt dan ook sterk afgeraden.

Om het u en het dier het makkelijk te maken, kunt u het beste het oor vanaf onder benaderen.

Jonge lammeren

Let op: Bij jonge lammeren is het door de grootte van het elektronische oormerk niet mogelijk om het oormerk op de aangeraden afstand van de kop aan te brengen. Het oormerk snijdt dan teveel in de oorwringen. Hierdoor raken de oren ontstoken. Daarom wordt vooral bij jonge lammeren het elektronisch merk nog wat verder van de kop aangebracht.

De wijze van aanbrengen

- Zorg dat het oor schoon en droog is. Vuile oren kunnen droog schoongemaakt worden.
- Eventueel kan het oormerk worden ontsmet in een niet-agressief ontsmettingsmiddel.
- Het vrouwelijk deel van het oormerk (het deel met het gat en knop) komt aan de voorzijde (binnenzijde) van het oor.
- Het mannelijke deel (deel met de pen) komt aan de achterzijde (buitenzijde) van het oor. De pen wordt dus vanaf de achterzijde van het oor ingebracht.
- Knijp de tang met de oormerkdelen in één beweging samen en laat direct daarna los, zodat het oormerk uit de tang lost.
- Controleer of er geen delen van het oor tussen pen en gat gevangen zitten.
- Het elektronische deel in het linkeroor van de geit of het schaap plaatsen.

Nazorg

Hou de wond goed in de gaten. Verwijder na een paar dagen de droge korsten rond de wond. De wond in het oor kan dan beter drogen aan de lucht, zo geneest het sneller. Eventueel kunt u gebruik maken van een ontsmettende spray of poeder.