

Handleiding aanbrengen Tagtronic Oornummers



Oor

Het Ministerie adviseert het linker oor voor het elektronisch oormerk (gezien vanaf de achterkant van de geit/het schaap).




Het plaatsen van de merkdelen in de tang

Plaats het vrouwelijk deel (met het gat en de knop) van het oormerk omlaag, in de uitsparing van de tang en onder de metalen klem. Let op dat het oormerkdeel ver genoeg in de tang zit.

Plaats het mannelijk deel van het oormerk (met pin) over de metalen stift. Zorg ook hier dat het oormerkdeel tot bovenaan is doorgedrukt.

Controleer door licht samendrukken van de tang of pen en gat recht tegenover elkaar zitten.

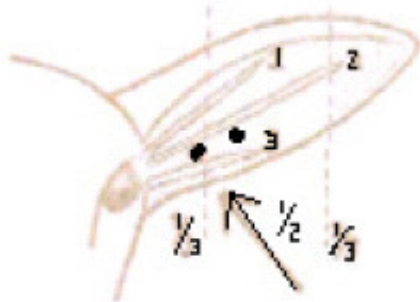

Plaats in het oor

Het aanbrengen van het oormerk gebeurt tussen de tweede en derde nerf van de oorschelp van bovenaf geteld, op $\frac{1}{3}$ e afstand tot $\frac{1}{2}$ van de kop (zie zwarte stippen in de tekening). Deze nerven zijn soms beter te voelen dan te zien.

Zorg dat de buitenkant van het merk niet de rand van de oorvouw kan irriteren of de aders klem zet.

Voordeel van deze plaatsing in het oor zijn dat de oormerken veel minder snel uitscheuren en het oor minder zal bloeden. Hoger en verder van de kop plaatsen wordt dan ook sterk afgeraden.

Let op: Bij jonge lammeren is het door de grootte van het elektronische oormerk soms niet mogelijk om het oormerk op de aangeraden afstand van de kop aan te brengen. Het oormerk snijdt dan teveel in de oorwringen, hierdoor raken de oren ontstoken. Daarom wordt vooral bij jonge lammeren het elektronisch merk nog wat verder van de kop aangebracht.

Om het u en het dier het makkelijk te maken, kunt u het beste het oor vanaf onder benaderen.

De wijze van aanbrengen

- Zorg dat het oor schoon en droog is. Vuile oren kunnen droog schoongemaakt worden.
- Eventueel kan het oormerk worden ontsmet in een niet-agressief ontsmettingsmiddel. Agressieve middelen kunnen het metaal van de tang na verloop van tijd aantasten.
- Het vrouwelijk deel van het oormerk (het deel met het gat en knop) komt aan de voorzijde (binnenzijde) van het oor.
- Het mannelijke deel (deel met de pen) komt aan de achterzijde (buitenzijde) van het oor. De pen wordt dus vanaf de achterzijde van het oor ingebracht.
- Knijp de tang met de oormerkdelen in één beweging samen en laat direct daarna los, zodat het oormerk uit de tang lost.
- Controleer of er geen delen van het oor tussen de pen en het gat gevangen zitten.

Nazorg

Hou de wond goed in de gaten. Verwijder na een paar dagen de droge korsten rond de wond. De wond in het oor kan dan beter drogen aan de lucht, zo geneest het sneller. Eventueel kunt u gebruik maken van een ontsmettende spray of poeder.